


**راهنمای pacs تحت وب**

**بیمارستان امام خمینی**

**جیرفت (ره)**

## مرحله اول:


از طریق یکی از مرورگر های رایج به آدرس 185.206.239.247:60000 مراجعه نمایید

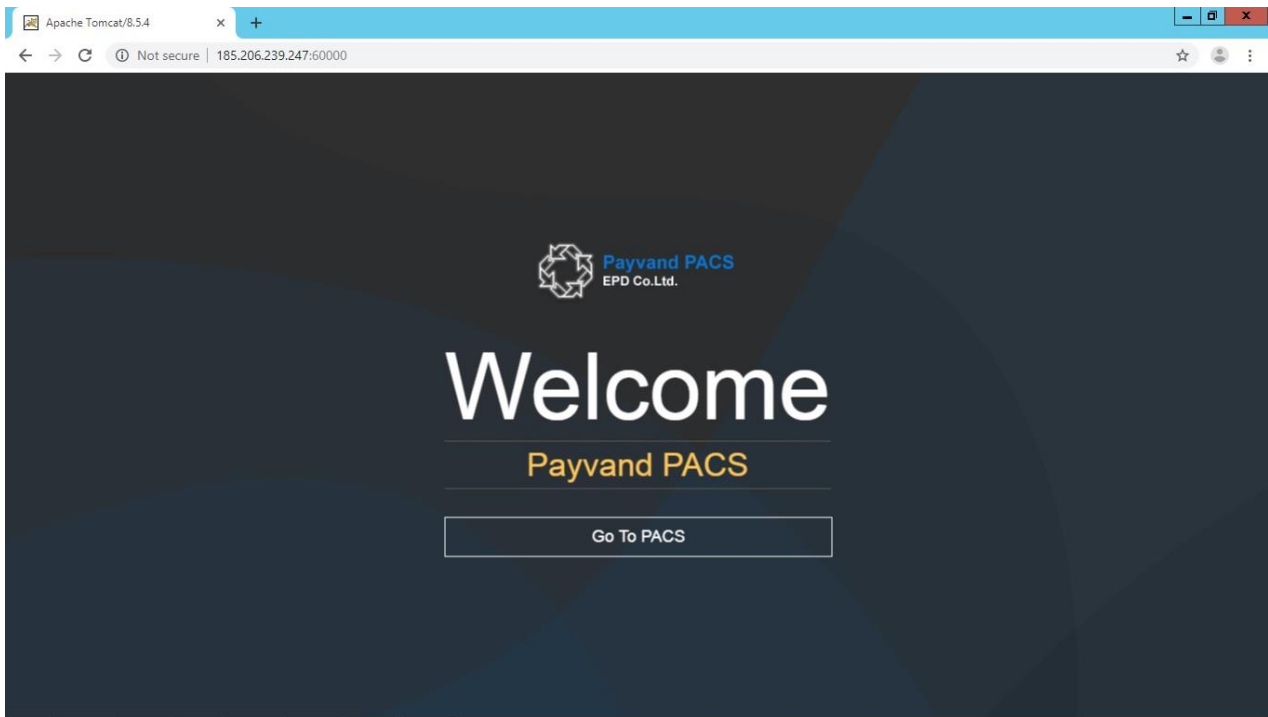

## مرحله دوم:

پس از کلیک بر روی گزینه GO TO PACS وارد صفحه بعد شده و در این قسمت Username و password خود را وارد کنید و

سپس بر روی گزینه SIGN IN کلیک نمایید. نکته: Username: intern --- Password: 12345

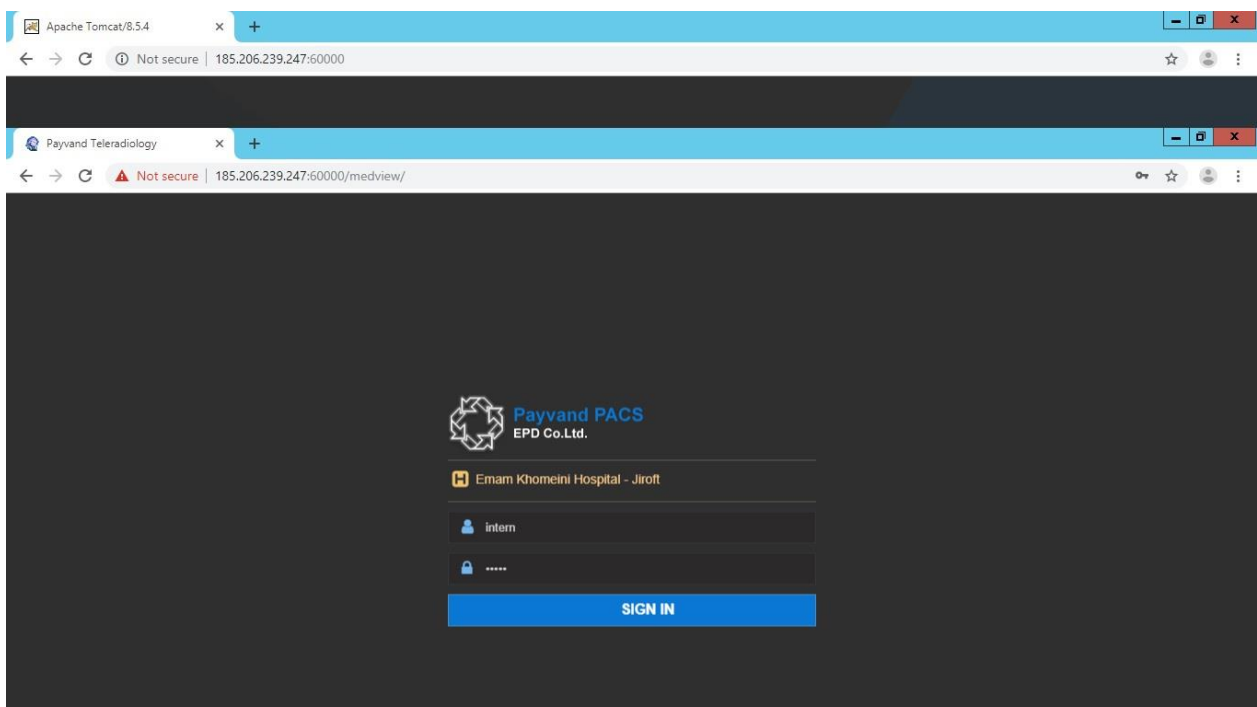

مرحله سوم:

در این قسمت فیلترهای مختلف جهت انتخاب بیمار وجود دارد (نام و نام خانوادگی، جنسیت، شماره الکترونیکی، تاریخ انجام طب تصویری و ...) با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارید اطلاعات را وارد نموده و سپس بر روی گزینه Search کلیک نمایید.

Search Studies

Patient Name:  Patient ID:

Referring Physician Name:  Study Description:

Institution Name:  Sex:

Modality:

Study Date From:

To:

SEARCH CLEAR FILTER

Copyright ©2007-2019 Ettalareshani Payvand Dadeha Co. Ltd. (EPD) | version 2.1.0

مرحله چهارم:

در این مرحله لیست بیماران فیلتر شده را مشاهده مینمایید، که با کلیک بر روی نام بیمار تصاویر مربوط به هر بیمار قابل نمایش می باشد.

Search result: Study level

Patient Name	Patient ID	Sex	Referring Physician Name	Study Description	Study Date	Institution Name	Modalities	View	Owners	Privileges
EBRAHIMI-30Y-MOHAMADREZA	502350	M		LS	2019-08-03		MR			
AMJAZI MOHAMAD REZA	502478				2019-08-03		CT			
AMJAZI MOHAMAD REZA	502478				2019-08-03		CT			
SHARIFI ABDALREZA	130332	M			2019-08-03		CT			
SANJARI ALIREZA	416039	M			2019-08-02		CT			
SANJARI QOLAMREZA	450229	M			2019-08-02		CT			
HAMZEI ALIREZA	92747	M			2019-08-02		CT			
REZAEI-35Y-SAEIDREZA	502089	M		BRAIN	2019-08-01		MR			
JALALI QOLAM REZA	502020				2019-08-01		CT			
ABBASI-39Y-ALIREZA	423115	M		LS	2019-07-31		MR			
ARSHAM MOHAMMADREZA	501866				2019-07-31		CT			

Copyright ©2007-2019 Ettalareshani Payvand Dadeha Co. Ltd. (EPD) | version 2.1.0

مرحله پنجم:

با انتخاب هر یک از نماهای مختلف عکس و چرخاندن Scroll موس میتوانید تصاویر را مشاهده نمایید.

